

電気式人工喉頭を楽しむ

発話から歌唱まで

Inspiration

インスピレーション



特長

- ✓ USB充電
- ✓ スイッチモード選択
- ✓ イントネーション機能

価格: ¥75,000 (非課税)

販売元

株式会社名優 276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台3-9-2
Tel: 047-480-6161 Fax: 047-480-6162 <http://www.meilleur.co.jp>

各部名称および機能

振動部

- 喉のもっとも柔らかく密着する箇所に当て、音源とします。




インジケータ

- 段階的に緑に点滅します。● 充電状態を示します。



③スライダー インジケータ

- 充電量を確認します。
- 指で触れボリューム、音程を調整できます。

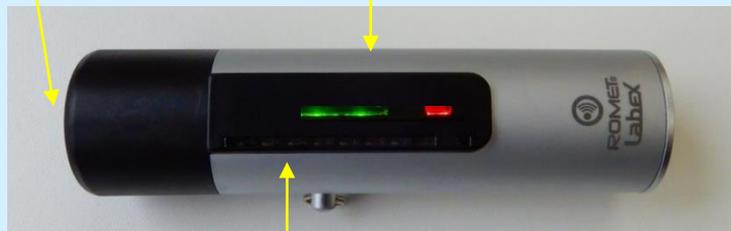

②FB（機能ボタン）

- モード設定時長押し
- 充電確認時 2秒押し

充電・赤色点灯

- 充電中点灯

緑色点灯

- USB接続時

①スイッチ

USB 接続部



品質保証 シール

- 剥がれると保証が無効

1

喉に当てると作動、発話・・・

- ● ● ● 初期設定

【設定】

1. ①スイッチをOFFにして電源を切る
2. ②FBを押しながら①スイッチをONにして、3秒待つ
3. ③のインジケータが赤く点滅、1つめの緑が点滅したなら②FBを離す
4. 設定確認ブザーが鳴る




- インジケータ

2

スライダーに触れると作動・・・

【設定】

1. ①スイッチをOFFにして電源を切る
2. ②FBを押しながら①スイッチをONにして、6秒待つ
3. ③のインジケータが赤く点滅、2つめの緑が点滅したなら②FBを離す
4. 設定確認ブザーが鳴る

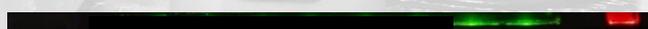

- インジケータ

※ 音量調整など、その他設定につきましては株式会社名優ホームページをご覧ください。

充電方法

同梱された充電器のUSBケーブルを接続します。充電中はUSB端子ちかくの緑のインジケータと赤のインジケータ両方が点灯します。充電時間はおよそ4時間です。フル充電するとインジケータの赤が消えます。フル充電後、20～24時間使用できます。

ONにした状態でFBを2秒押し続けると充電状態を確認できます。緑のインジケータ8つ全てが点灯しているとフル充電。緑のインジケータの数が少なくなるにつれ、残量が少なくなっています。残りわずかになると赤のインジケータも点灯します。